



## 2. 관리요령 및 보관방법

1. 보관 시나 청소 시에 제품에 강한 충격을 주거나 떨어뜨리면 고장이나 제품 수명 단축의 원인이 되므로 주의 하십시오.
2. 패드에 묻은 젤이나 먼지 등 이물질은, 부드러운 물수건으로 가볍게 닦아 주십시오.
3. 본체, 벨트 등에는 물기가 제품 내로 침투하지 않도록 마른 천으로 표면의 먼지를 가볍게 닦아 주십시오.
4. 금속으로 되어있는 초음파 도자는 소독용 알코올을 묽게 희석하여 관리해 주시고, 금속부 이외의 제품에는 알코올, 벤젠, 시너와 같은 용제를 사용하지 마십시오.
5. 제품 관리 후에는 충분히 건조시켜 주십시오.
6. 사용 후에는 전원스위치를 끄고 전원케이블을 뽑아 사용 전의 상태로 보관하십시오.
7. 사용 후 패드, 벨트 등의 구성품을 제 위치에 잘 넣어 보관하십시오.
8. 전원케이블을 굽히거나 무리한 힘으로 형태 변경하여 보관하지 마십시오.
9. 사용 후에는 제품 표면을 깨끗이 한 후 마른 상태로 보관하십시오.